



내부 교육용

POTENZA[®]

Non-invasive RF 포 / 텐 / 자
Invasive RF



01. 포텐자 특징


“ 포텐자는 RF(고주파) 에너지를 이용하여, 비침습모드, 침습모드를 복합적으로 적용하는 시술입니다. ”

- ① 다양한 피부층을 타겟팅.
- ② 고주파(RF) 에너지를 사용.
- ③ 비침습모드, 침습모드, 복합 시술.
- ④ 생체 저항에 의해 발생하는 열을 이용.
- ⑤ 조직을 응고시켜 효과적.



02. 포텐자 복합 시술

〔 비침습형 RF 〕

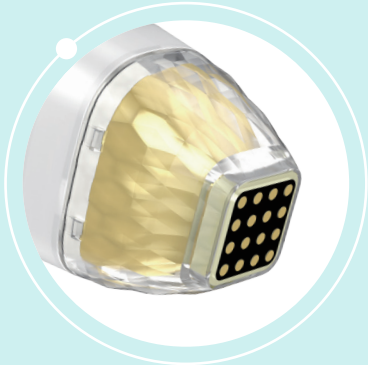


1 피부표면에만 접촉하는 비침습형

2 Electrode(전극) 타입

3 모노폴라, 바이폴라 (다이어몬드팁) 교차조사

Monopolar
(모노폴라)

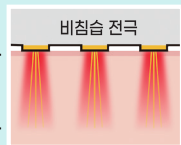

피부 깊은층까지
강력하게 RF에너지를
전달하는 모노폴라방식


Bipolar
(바이폴라)



피부층안에서 RF에너지를
좌우로 골고루 펼쳐지게
전달하는 바이폴라방식

비침습 + 침습


RF(고주파 에너지) 복합 시술

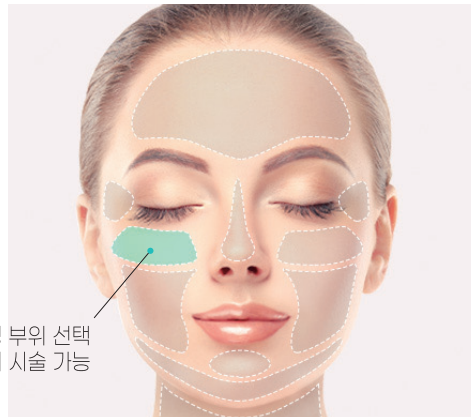

특정 부위 선택
하여 시술 가능

POTENZA®

〔 침습형 RF 〕

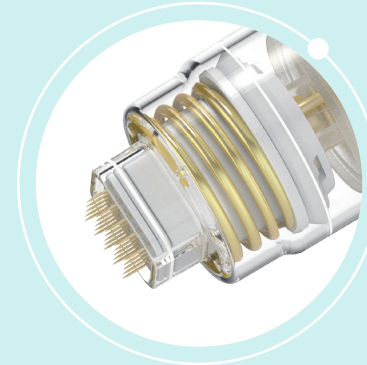


1 피부에 직접 침투하는 침습형

2 Microneedle(미세바늘) 타입


3 절연 니들, 비절연 니들

Insulated
(절연니들)

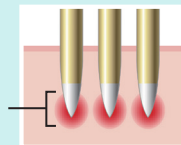

절연이 안되어 있는
바늘의 끝단 부분에서만
RF에너지가 발생됩니다

Non-insulated
(비절연니들)

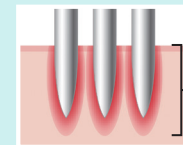

바늘 전체가 비절연이어서
피부에 침투된 바늘 전체에서
RF에너지가 발생됩니다

복합
시술



포·텐·자
POTENZA®

포텐자 각 종류별 팁

키오스케인 팁



03. 비침습형 팁의 종류

Non-invasive RF

피부 표면에 접촉하여
전극타입의 팁에서 피부층으로
RF에너지를 골고루 전달합니다.



DIAMOND 팁

Mono+Bi ➡ 1 Shot

- 한샷에서 모노폴라와 바이폴라, 교차 조사
- 6 mm 깊이까지 에너지 도달 가능
- Monopolar + Bipolar
- 전극수 : 16 EA (4X4)



DDR 팁

Deep Dermal Heating

- Multiple pulse를 이용한 Dermal Heating
- 2.5 mm 깊이까지 에너지 도달 가능
- Bipolar / 2MHz
- 전극수 : 36 EA (6X6)



설정을 통해 팁의 절반만
에너지 조사 가능

SFA 팁

Superficial Energy Delivery


- 팁 전체 면적 에너지 조사 - Full Face용
- 팁 절반 면적 에너지 조사 - 좁은 부위용
- Bipolar / 2MHz
- 전극수 : 192 EA (24X8)

04. 비침습형 팁의 작용

다이아몬드팁



에너지 작용

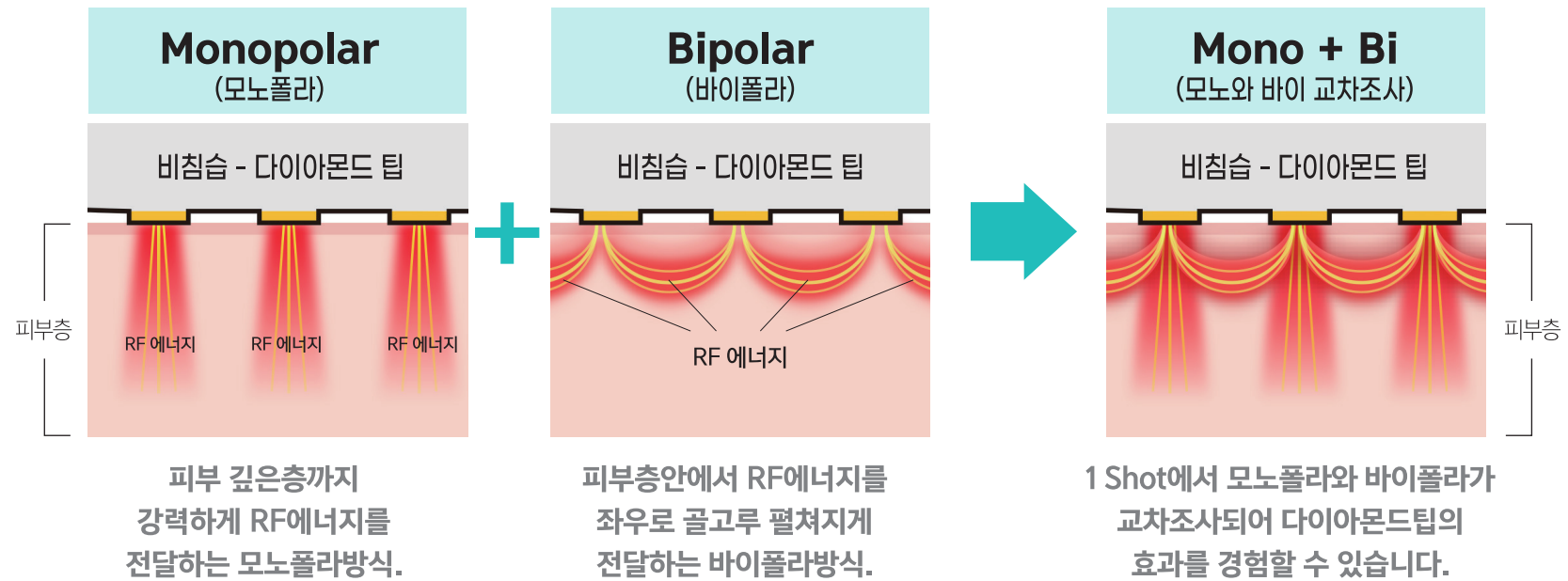

DDR팁과 SFA팁은 바이폴라만 가능합니다.

05. 침습형 팁(멀티니들)의 종류


Invasive RF (멀티니들)

미세바늘이 피부에 직접 침투하여
얇은 피부층 부터 깊은 피부층까지
효과적으로 RF에너지를 전달합니다.




절연 니들 팁

니들의 끝단 0.3mm 부분을 제외하고는
절연처리가 되어 있어서 RF에너지가 니들의 끝단부에서만 발생합니다.

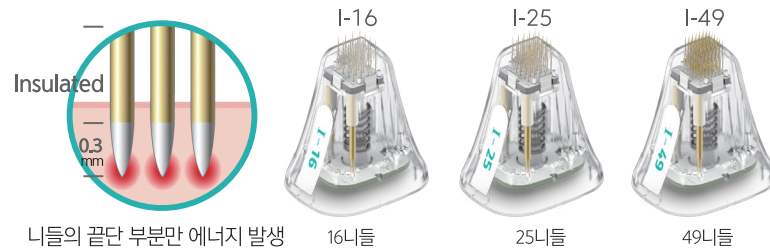


비절연 니들 팁

니들에 절연되어 있는 부분이 없어서
니들이 피부에 침투시 니들의 전체 부분에서 RF에너지가 발생합니다.

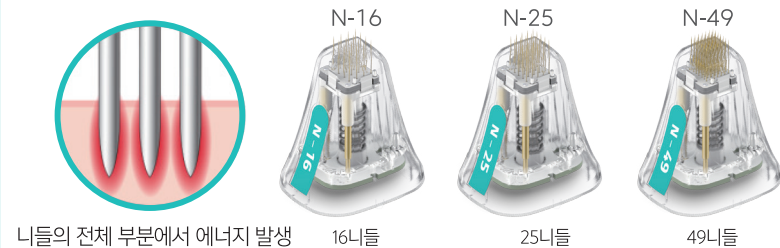


펌핑모드용 팁

포텐자의 펌핑모드시 사용되는 팁입니다.

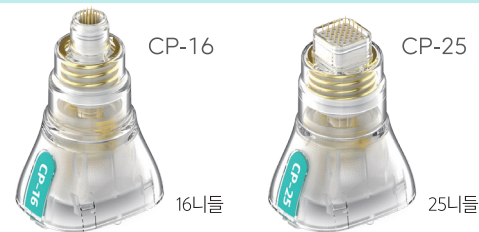


06. 침습형 팁(멀티니들)의 작용

침습형 멀티니들

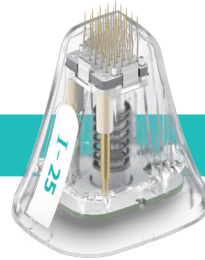


에너지 작용

Targeting (피부층 타겟팅)

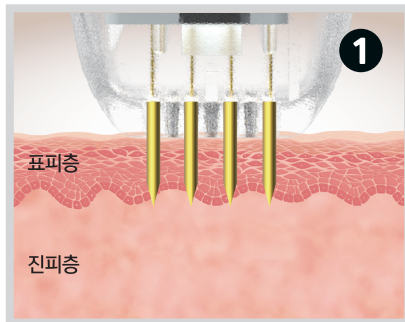


시술할 피부층을 선택하여 타겟팅합니다. 0.5mm 부터 4mm 까지의 피부층 타겟이 가능합니다.

RF energy (고주파 에너지 발생)

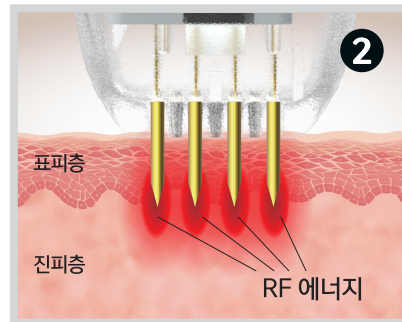

타겟팅된 피부층에 4종류의 RF모드를 활용하여 포텐자의 RF에너지를 조사합니다.

Coagulation (조직의 응고 작용)

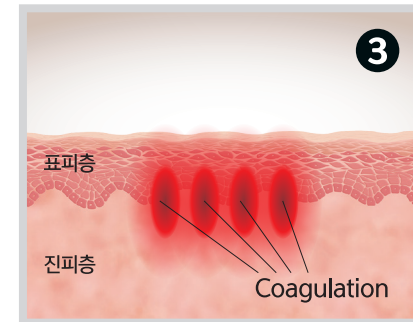

피부내 전달된 RF에너지는 생체저항에 의해 열이 발생되고 세포조직의 응고 작용이 일어납니다


07. 침습형 팁 - ONE 니들

Invasive RF (ONE 니들)

미세바늘이 한개 장착된 팁으로,
피지선을 타겟팅합니다



ONE 니들 팁

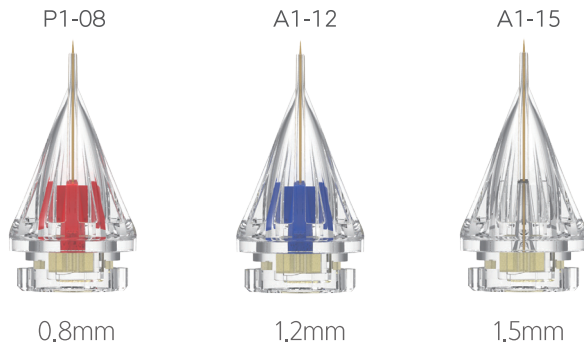


침습형 ONE 니들

에너지 작용




Sebaceous Gland (피지선 타겟팅)

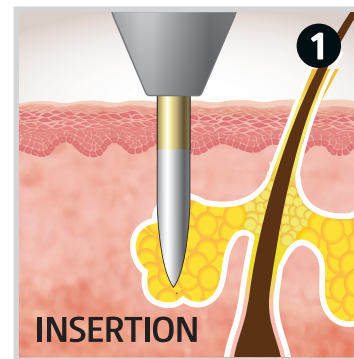

미세 바늘이 한개인
침습형 ONE 니들은 피부속
피지선 부위를 타겟팅합니다.

Coagulation (피지선의 응고)

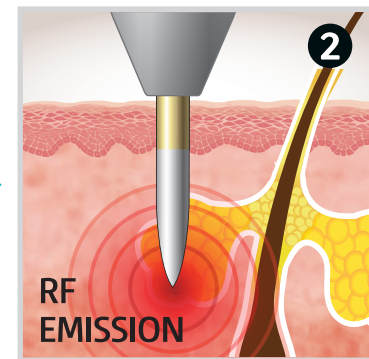

RF에너지에 의해
피지선 부위의 응고(변성)
효과를 기대할 수 있습니다.



포·텐·자
POTENZA®


포텐자의 장점



장
점

08. 다양한 깊이에 시술 가능

포텐자는 다양한 피부
깊이에 시술이 가능합니다.

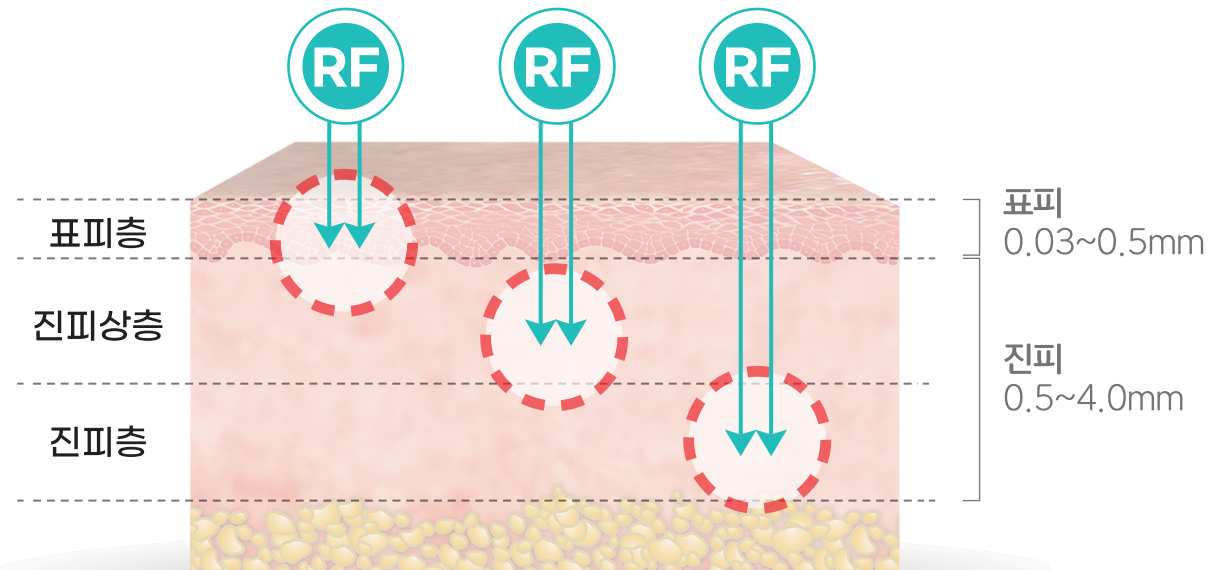

비침습 팁 (멸균처리)

비침습 팁의 피부 속 에너지
도달 깊이는 최대 6mm 입니다.



침습 팁 (멸균처리)

미세바늘의 피부 침습 깊이는
0.5mm~4.0mm까지 입니다.

포텐자의 팁은 EO가스로 멸균처리 되어 있습니다.

09. 포텐자 - 다양한 팁

포텐자는 총 14종류의 팁으로
다양한 RF 에너지 시술이 가능합니다

비침습 - 3종류

DIAMOND



DDR




SFA




침습(멀티니들) - 8종류

I-16

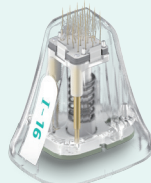


16니들

I-25

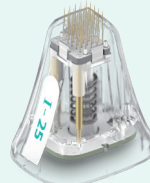


25니들

I-49

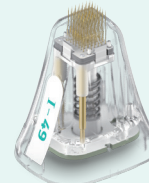


49니들

N-16

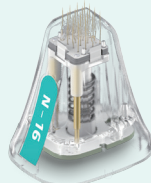

16니들

N-25

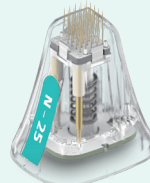

25니들

N-49



49니들

CP-16



16니들

CP-25




25니들

침습(원니들) - 3종류


P1-08



A1-12

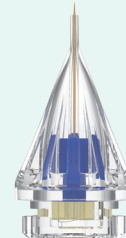

A1-15

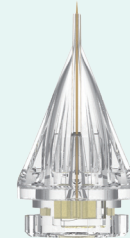



포·텐·자
POTENZA®

포텐자 FAQ



FAQ

10. 포텐자 FAQ

포 / 텐 / 자
POTENZA®

Q. 시술 전 주의사항은?

A. 자외선에 너무 심하게 노출되어 화상(sun burn) 있다면 치료가 힘들 수 있습니다.
최근 다른 시술을 받았다면, 최소 4주 지난 후 받기를 권장합니다.

Q. 시술 시간은?

A. 마취가 필요한 경우 준비부터 후처치까지 약 1시간 정도 소요됩니다.
마취 시 통증은 거의 없으며, 후처치 후 2~3시간 내 붉은기도 거의 사라집니다.

Q. 시술 후 관리는?

A. 자외선 차단을 꼭 해주시고, 충분한 수분공급에 신경 써주세요.

Q. 몇 회 시술이 필요한가요?

A. 시술에 따라 다르지만 1회만으로도 효과가 있으며, 시술 횟수, 생활 환경과
피부 상태에 따라 다양하게 나타납니다.

* 자세한 내용은 원장님께 상담해 주세요.

POTENZA®

이제 새로운 포텐자를 경험해 보세요.



POWER / POTENTIAL / POSSIBILITY